
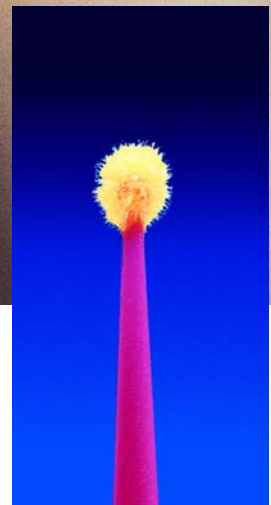
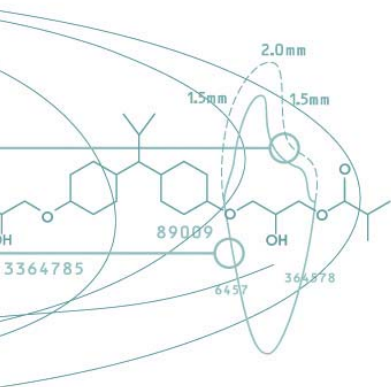


3M ESPE

Självetsande bonding

Etsning, primning och bonding på några sekunder

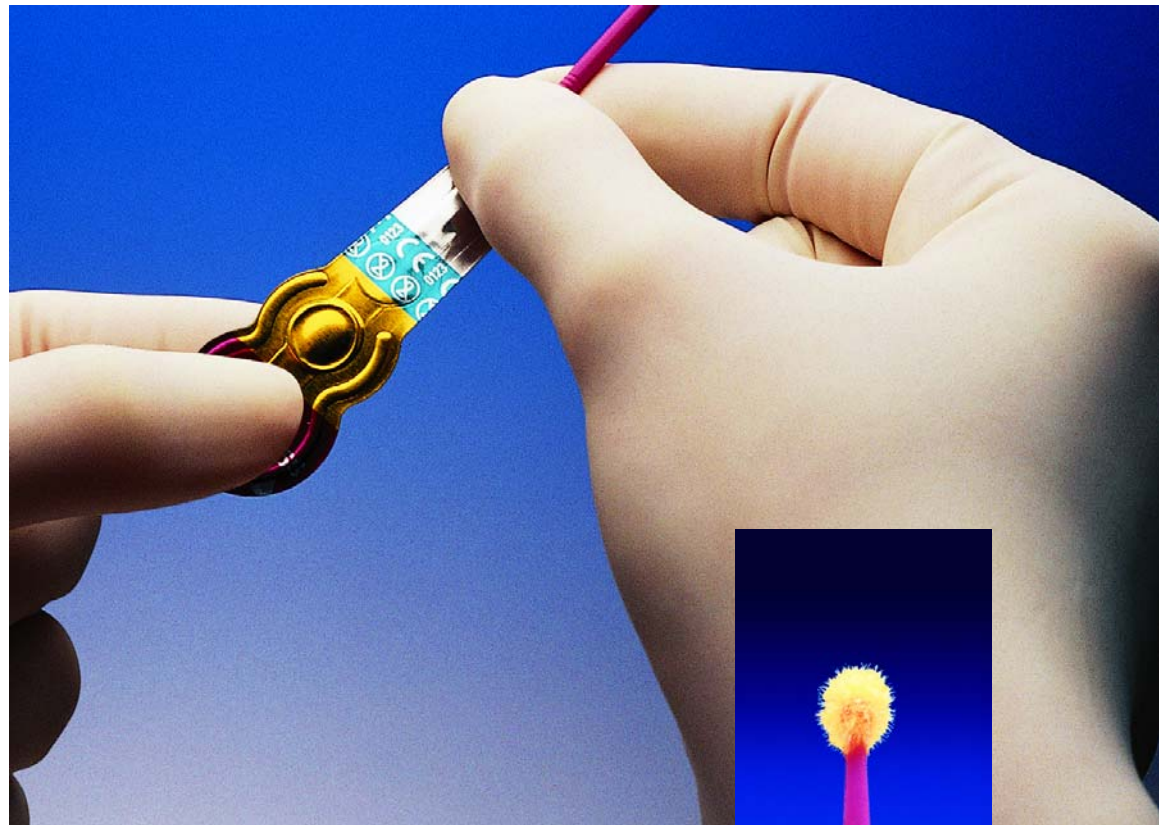

Adper™

Prompt™ L-Pop™

Adper™ Prompt™ L-Pop™

En självetsande bonding till ljushärdande kompositer och kompomerer. Få moment – snabbt och enkelt. Den smarta förpackningen underlättar ditt arbete.

Appliceringsteknik:

Gnugga in vätskan i 15 sek. Applicera därefter ett andra lager. Blås torrt och ljushärda i 10 sek. Etsning separat behövs ej. Går att ljushärda med alla slags härdningslampor.



Tryck

Vik över

Tryck

Klar

Stark bindningsstyrka utan separat ets:

- Snabbare
- Bättre
- Enklare



Dina fördelar med Adper™ Prompt™ L-Pop™:

Enkel aktivering – Tryck – vik – tryck - färdigt

Snabb och enkel applicering – Minskar risken för fel, ger högre säkerhet.

Utmärkt bindning – Med Adper™ Prompt™ L-Pop™ har vi förbättrat dentinbindningen ytterligare!

Aktiveringskontroll – Det är lätt att se om L-Pop systemet har blivit riktigt aktiverat. Genom att trycka på den stora kammaren expanderar bubblan i nästa kammare

Hög viskositet – Enkel att applicera och att få den rätta fuktigheten i kaviteten.

Nyblandat material vid varje behandling – Tack vare den smarta förpackningen är Adper Prompt L-Pop nyblandat vid varje individuell applicering

Bättre hygien – Inget smuts och spill, ingen kontamination

Kontroll - Guldfärgad vätska ger utmärkt visuell kontroll

Beställningsinformation:



41923 - Mini Pack: 20 Adper Prompt L-Pop (2,4 ml) with Fine/Yellow Single-Use, Applicators XS

41925 - Normal Pack: 40 Adper Prompt L-Pop (4,8 ml) with Standard/Red Single-Use, Applicators M

41926 - Giant Pack: 100 Adper Prompt L-Pop (12,0 ml) with Standard/Red Single-Use, Applicators M

3M ESPE