

■ R-Brush instruktionsmanual

● **Avsedd användning:** R-Brush är ett instrument som används för att utföra periimplantitbehandling

● **Försiktighetsåtgärder**

1. Denna medicintekniska produkt är avsedd för engångsbruk och får inte återanvändas.
2. Denna produkt är ett sterilt medicinskt instrument. Om produkten och/eller förpackningen är skadad ska produkten kasseras.
3. Produkten får inte användas för andra ändamål än de avsedda.
4. Vid användning utan gingivalt snitt, ska god åtkomlighet tillses med sond, kyrett eller periotom.
5. Använd fysiologisk koksaltlösning.
6. Vid överdriven vridning kan spetsarna brytas. Titta efter och avlägsna eventuella brutna spetsar efter användning.
7. Tandläkaren ska vara fullständigt informerad om handhavande och försiktighetsåtgärder vid användning av produkten.
8. Denna produkt är engångs, dvs. får endast användas till en patient och ett implantat. Överanvändning kan resultera i ackumulerad försvagning av spetsarna.

● **Förberedelse inför användning**

- A. Denna produkt är en steril medicinteknisk produkt:
 - Kontrollera produktens utgångsdatum och att förpackningen är intakt.
 - Produkten får inte användas om förseglingen är skadad eller bruten.
- B. Välj rätt storlek på produkten.
- C. Kontrollera produktens skick för att upptäcka repor eller annan skada.

● **Användning**

A. Lagg lokal anestesi.

B. Avlägsna protetiska konstruktioner.

C För att skydda implantatets protetiska plattform och dess interna gängor används R-Brush Cap som finns i två olika storlekar:

CAP20 (liten) kan användas för normalbreda och breda implantat med intern eller extern koppling (Regular, Wide).

CAP25 (stor) vid behov till större protetisk plattform.

Applicera R-Brush Cap enligt följande:

① Använd patientens protetiskskruv och för in denna i R-Brush Cap [Bild 1] för att fästa denna såsom visas på bild 2e.

(Bild 1) (Bild 2)



② Montera R-Brush Cap med protetikskruven på implantatets protetiska plattform såsom visas i Bild 3 och drag åt med 3 -5 Ncm.

[Bild 3]



D. Avlägsna inflammerad mjukvävnad efter gingival incision.

E. Kör implantatmotorn på 2 000 till 5 000 varv per minut (rpm), med högst 5 Ncm vridmoment (rotationshastighet och vridmoment) med en långsam uppåt- och nedåtrörelse, utmed implantatytan och torka av. Var noga med att inte vidröra förankringsskruven med R-Brush. Vi rekommenderar att du spolar och rengör implantatet under en minut per gänga. Kontrollera hur rent implantatets yta är under förstoring (2,5 gångers förstoring eller mer) och utför ytterligare rengöring efter behov. Använd en spolvätska såsom 0,2 % klorhexidin eller koksaltlösning.

- **Efter användning**

Denna medicintekniska produkt är avsedd för engångsbruk och får inte återanvändas.

- **Förvaring:** Förvaras i rumstemperatur skyddat från direkt solljus och fukt.

- **Hållbarhet:** 5 år från tillverkningsdatum

- **Distributör:** Neobiotech Europe B.V.

- Adress: Rotterdam Science Tower (18:e våningen) Marconistraat 16 3029 AK, Rotterdam, Nederländerna

- Tel: +31 (0) 10 850 76 97

- e-post: info@neobiotecheu.com

- web: www.neobiotecheu.com

Revidering: 22 november 2017 (Rev. E-1)