

Proxident Muntork



Proxident extra mjuka muntork är ett enkelt och hygieniskt hjälpmedel vid munvård.

Användbar såväl vid rengöring som vid behandling med flytande lösningar och återfuktning av munhålan.

Det är ett smidigt verktyg med flera funktioner som underlättar ditt arbete samtidigt som det är skonsamt för patienten.

Proxident Muntork


Vår Proxident muntork fungerar som ett skonsamt och effektivt hjälpmedel vid munvård i olika former. Det är en produkt som verkligen gör skillnad i vardagen, både för vårdpersonalen och för svårt sjuka människor.

Tillverkning och förpackning

- Varje Muntork testas vid tillverkning så att skumgummit sitter fast
- Tillverkad enligt GMP i Sverige
- Renhetsgrad: Renrum EU GMP klass D (ISO14644-1, ISO 8 klass 100 000)
- Muntork finns i small och large, förpackade i påse (50 st) samt enstyckeförpackade (150 st).

Egenskaper vid rengöring

- Mjukt skumgummi för känsliga munslemhinnor
- Räfflad för effektiv rengöring vid cirkel rörelser
- Plastpinne som kan böjas för lättare åtkomst i munhålan
- Tål vätska

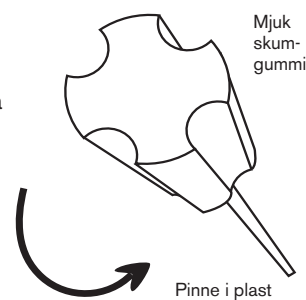


Egenskaper vid behandling med olika vätskor

Muntorken suger upp, håller kvar och avger vätska. Den passar bra för behandling med smärtlindrande-, slemlösande- och salivstimulerande vätskor samt vid fluorbehandling, klorhexidinbehandling och t ex medel mot dålig andedräkt.

Muntork large suger upp 5–7 ml och small ca 3 ml beroende på vätskans densitet. Använd ett ml mått för rätt dosering. Tryck muntorken mot en yta för att suga upp max mängd vätska.

Om muntorken är välfylld, tänk på att badda med lätt tryck för att minska risken för att patienten får vätska i halsen.

Endast för engångsbruk.

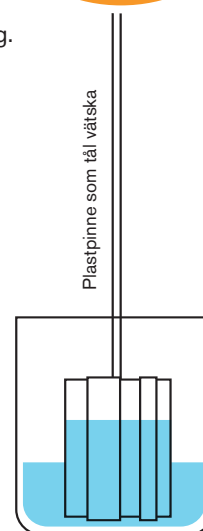

STUDIE

"Jämförelse av olika sätt
att administrera fluor
hos personer med muntorrhet"

Studie utförd av
Chefstandläkare, Docent
Pia Gabre, Uppsala

Man sög upp ca hälften av 2 ml mild
fluorlösning 0,2 % i Proxident small
muntork och applicerade först
på ena sidan genom att gnugga
tänder och munslemhinna med torken
i ca 10 sek. Därefter sögs resten
av lösningen upp och samma
procedur upprepades på andra
sidan.

Resultatet gav samma effekt på
fluorkoncentrationen som vid mun-
sköljning med 0,2 % fluorlösning
i 1 minut. Den totala mängden fluor
som användes vid varje behandling
hamnade på 0,32 mg.


*Bra alternativ då patienten
inte själv kan skölja!*




Foton Chefstandläkare, Docent Pia Gabre, Uppsala

Pia Gabre, DDS, PhD; 1, 2* Ulla Moberg Sköld, DDS, PhD; 2 Döwen Birkhed, DDS, PhD 2 1 Public Dental Health, Uppsala County Council, Uppsala, Sweden; 2 Department of Cariology, Institute of Odontology, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.

*Corresponding author e-mail: pia.gabre@lul.se
Spec Care Dentist 33(3): 111-117, 2013

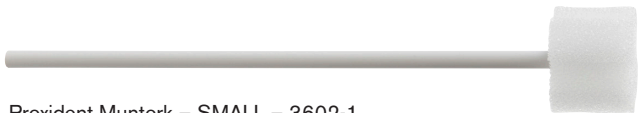

Proxident Muntork – SMALL – 3602-1

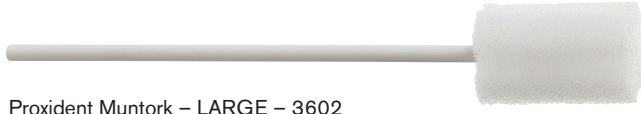

Proxident Muntork – LARGE – 3602



Proxident Muntork – SMALL
SINGELPACK – 3612



Proxident Muntork – LARGE
SINGELPACK – 3613



FÖRDELAR Proxident Muntork

- Proxidents skumgummi är extra mjukt. Patienten upplever behandlingen behaglig och kan slappna av och vårdpersonalen får lättare att utföra munvården.
- Det är enkelt att behandla långt bak i munnen med Proxident muntork small, eftersom den är så liten och mjuk. Bra vid t ex behandling med SB12 för dålig andedräkt, då tungryggen ska baddas.
- Proxident suger upp stor mängd vätska (5–7 ml). Proxident håller vätskan kvar och avger vätska på ett kontrollerat sätt, beroende av hur hårt man trycker skumgummit mot tänder/munslemhinnor.
- Att suga i sig vätska via Proxident muntork är ett bra alternativ för personer som inte kan dricka ur glas eller suga upp vätska med sugrör. Cirka 5 ml vatten 30 gånger ger 1,5 dl vatten.
- Proxidents pinne är av plast som tål vätska och som är mjukt sviktande för att det ska vara möjligt att komma åt långt bak i munnen.

Detta Dokument är framtaget i samarbete med Leg Tandhygienist Maria Juslin ACT Akademiskt Centrum för Äldretandvård Stockholms sjukhem som i över 15 år använt Proxident Muntork och andra konkurrerande märken på olika målgrupper inom vården.

Proxident AB
Box 470, 791 16 FALUN
tel 023-79 22 22
fax 023-79 22 01
www.proxident.se info@proxident.se